

Choix du matériel de prélèvement



VEINES FACILES
Aiguilles
Nombre de tubes < 5-6



VEINES DIFFICILES
Unités à Ailettes
Nombre de tubes > 5-6



HEMOCULTURES
Unités à Ailettes



PRECONISATIONS DE MATERIEL DE PRELEVEMENT SANGUIN

Code : C2-IN04-PRECMAT
Version : 1
Date d'application : 07/05/2020


Fiche d'instruction

Révision : 0

Page 2 sur 4

	Quand faut-il les utiliser ?	LES AVANTAGES	LES LIMITES
<p>Aiguilles Signal BD ECLIPSE :</p> 	<p>Utilisation recommandée pour :</p> <p>TOUS LES PRÉLÈVEMENTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meilleure qualité de prélèvement Le sang passe directement dans le tube pour une action immédiate des additifs contenus dans le tube sur les cellules ▪ Visualisation du retour veineux lorsque l'aiguille est dans la veine ▪ Remplissage plus rapide des tubes ▪ Investissement financier plus faible 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demande plus de dextérité dans le geste Difficile à utiliser sur certaines veines ou certaines situations.
<p>Unité de prélèvement à ailettes sécurisée :</p> 	<p>Utilisation recommandée pour :</p> <p>LES PRÉLÈVEMENTS DIFFICILES (veines délicates ou patients agités)</p> <p>ET HÉMOCULTURES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maniabilité idéale pour les prélèvements difficiles Aiguilles plus petites adaptées sur un système plus flexible ▪ Visualisation du retour veineux lorsque l'aiguille est dans la veine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tubulure à purger si prélèvement tube à hémostase Pour éliminer le volume d'air de la tubulure et remplir correctement le tube  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risque d'hémolyse ▪ Activation des plaquettes possible L'action des additifs du tube n'est pas immédiate ▪ Investissement financier Prix plus élevé qu'une aiguille

Péremptions et conditions de stockage

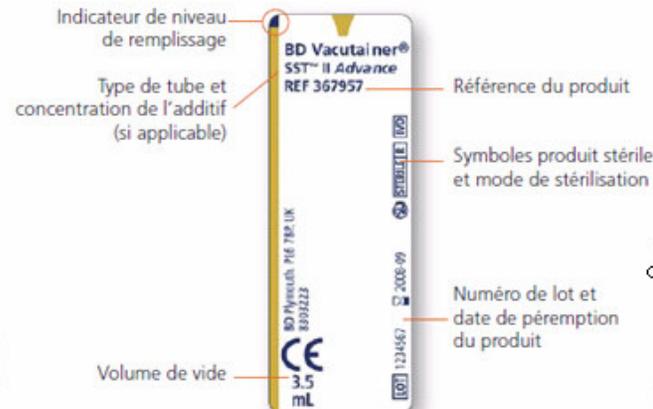

Tubes de prélèvement

- Vérifier la date de péremption
- Tenir à l'abri des rayons solaires
- Conservation entre +4°C et +25°C



Aiguilles de prélèvement

- Vérifier la date de péremption
- Vérifier l'intégrité du sceau de stérilité

LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE 	PRECONISATIONS DE MATERIEL DE PRELEVEMENT SANGUIN		Code : C2-IN04-PRECMAT Version : 1 Date d'application : 07/05/2020
	Fiche d'instruction	Révision : 0	Page 4 sur 4

Péremptions et conditions de stockage

Quels sont les risques d'utiliser un tube périmé ?

-  Perte de vide
-  Formation de micro-caillots
-  Hémolyse

Recommandations

- Ne pas garder trop longtemps en stock des boîtes de prélèvement
- Utiliser des petits stocks à rotation rapide
- Ranger les boîtes en fonction des dates de péremption